

RescueNet™ CodeReview セットアップガイド



ZOLL®

【選任製造販売業者】

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル
TEL:03-6205-4920（代表）

www.ak-zoll.com



CO-B 210611 Rev.1.1

AsahiKASEI
旭化成ゾールメディカル

RescueNet™ CodeReviewは救命活動時、ZOLL除細動器やAEDに記録されたデータを統一されたフォーマットで収集、解析、管理を行うソフトウェアです。
この資料ではソフトのインストール手順、本体からUSBへのデータ転送手順、およびデータファイルのCodeReviewへの転送手順を説明します。

1 - ソフトのインストール手順1

2 - X Series™ 本体からUSBメモリへのデータ転送手順5

3 - AED Pro® 本体からUSBメモリへのデータ転送手順6


4 - AED 3® BLS本体からUSBメモリへのデータ転送手順7

5 - データファイルのCodeReviewへの転送手順8




※RescueNet CodeReviewの詳細につきましては、スタートガイドを参照願います。

CodeReviewのインストール手順

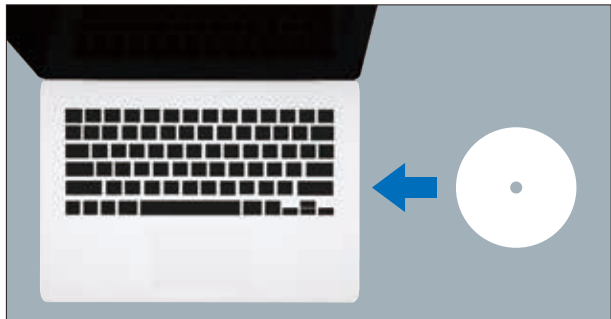


同梱されているCDをPCで読み込んでください。

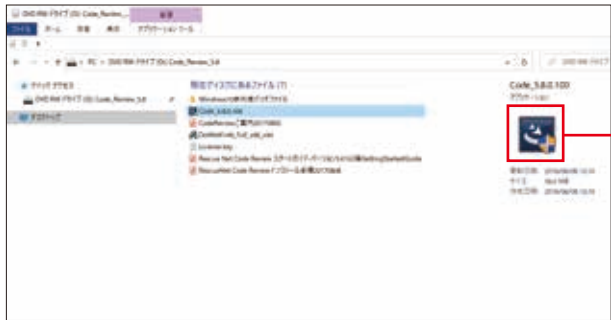


「Code_5.8」をクリックしてファイルを実行してください。


注意:Code_5.8がインストールできない場合は、DotNetFx40_Full_x86_X64(.NET Framework4.0)をインストールし、再度、インストールをしてください。

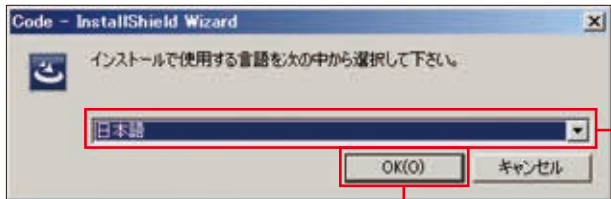

言語選択をして、「OK」をクリックしてください。

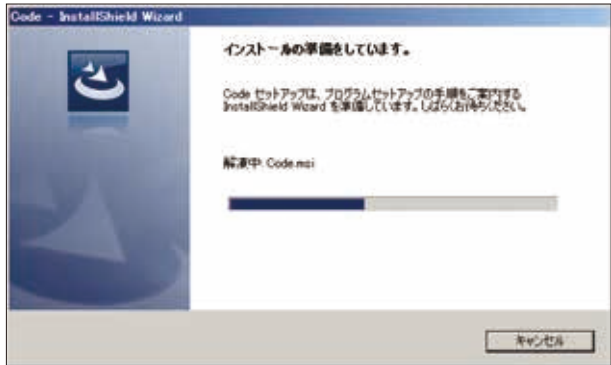

インストールの準備に入ります。

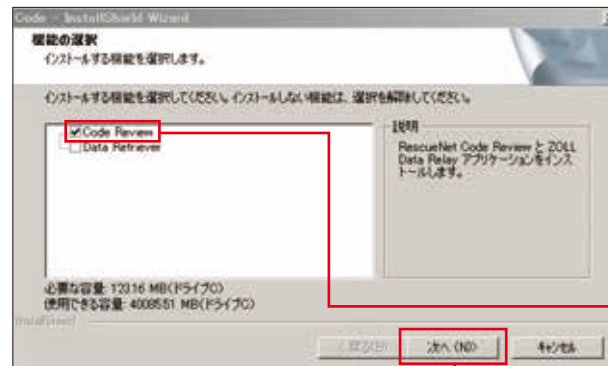

CodeReview に「✓点」が入っていることを確認し「次へ」をクリックしてください。

※Data Retrieverの「レ点」は必要ありません。

CodeReview に「✓点」が入っていることを確認

「次へ」をクリック



ライセンスキー
[040208]-[760786]-[442922]-[625455]
を入力し、「次へ」をクリックしてください。


ライセンスキー入力

「次へ」をクリック




サンプルファイルが必要でしたら、「はい」をクリックしてください。

必要なら「はい」をクリック

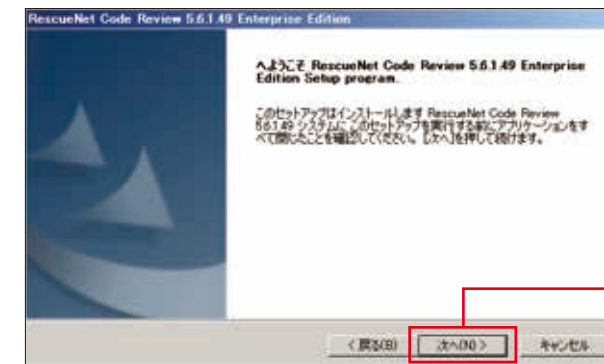


その後、インストール準備を開始しますので「次へ」をクリックしてください。

「次へ」をクリック

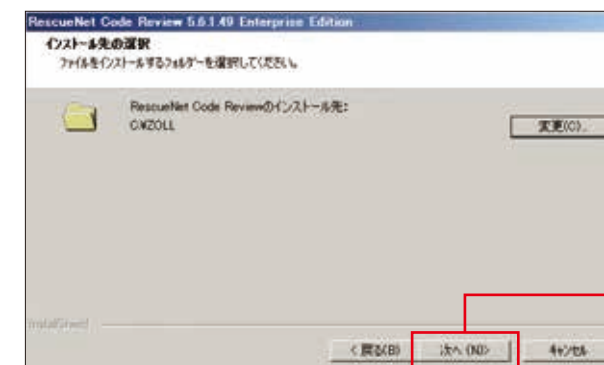


CodeReviewのインストール先を変更できます。必要なければ、「次へ」をクリックしてください。

「次へ」をクリック

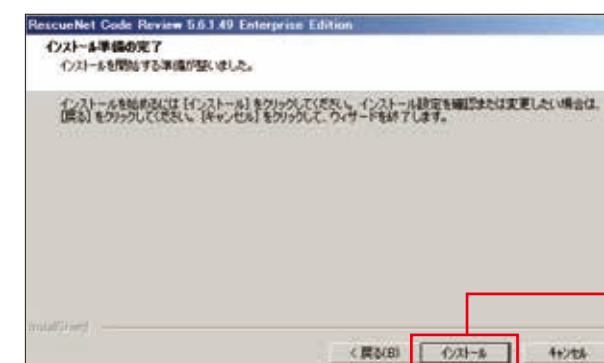

インストール準備完了後、「インストール」をクリックしてください。


「インストール」をクリック

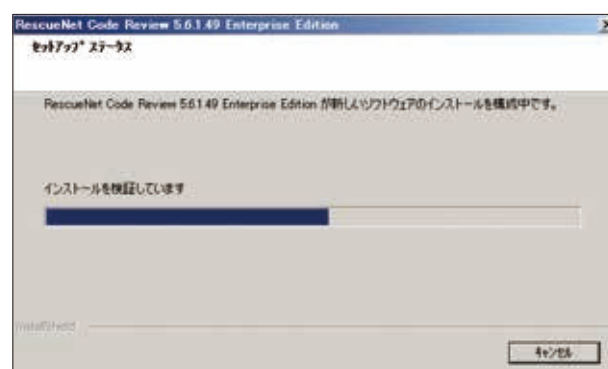

インストール開始後、
左記の画面が出てきます。



CodeReview APIファイルを
インストールしてます。

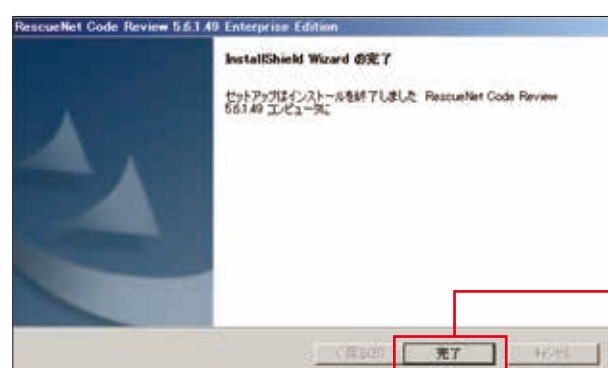

最後に「完了」をクリックしてください。

「完了」をクリック



デスクトップ等にCodeReviewの
アイコンがある事を確認してください。

CodeReviewのアイコンを確認

X Series™ 本体からUSBメモリへデータファイル転送

X Series モニター付き除細動器からデータファイルを転送するには、
次の手順に従ってください。

1. 電源スイッチを押して本体を通常通り立ち上げます。

2. クイックアクセスキーで「進む/戻る」で2ページ目を表示します。



進む/戻る

3. クイックアクセスキーで「記録」を選択します。



記録


4. クイックアクセスキーで「記録転送」を選択します。



記録転送

5. 本体サイドパネルのUSBデバイスポートへUSBメモリを挿入します。

USBデバイスポート

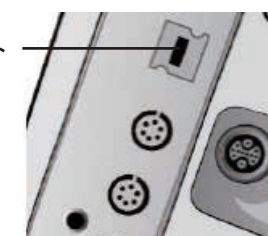

6. クイックアクセスキーで転送したい症例を選ぶと転送が開始されます。

7. データの転送中は視覚アラームインジケータが緑色に点灯します。

8. 緑色ライトが消えると転送が完了となります。

※視覚アラームインジケータが点灯中はUSBメモリを取り外さないでください。

AED Pro® 本体からUSBメモリへデータファイル転送

AED Pro 半自動除細動器からデータファイルを転送するには、次の手順に従ってください。

1. AED Pro の上面側にあるカバー留めを外しカバーを上を持ち上げて、バッテリーカバーを外します。
2. 本体の電源ボタンを5秒以上押し続けて、調整モードで始動します。
3. バッテリー収納部内にUSBメモリを取り付けます。
※「USBが接続されました」というメッセージが音声で発せられ文字が表示されます。


4. 「USB」と表示された左ソフトキーを押します。



5. 「New」と表示された左ソフトキーを押して、最後にダウンロードを行った後の更新された新しいデータをすべてダウンロードします。

※「データをダウンロード中です」というメッセージが音声で発せられ文字が表示されます。

※「ALL」を選択すると全てのデータをダウンロードします。

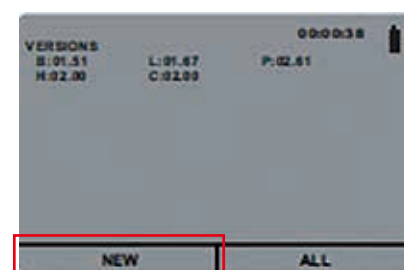

6. データのダウンロードが終わると「データのダウンロードが完了しました」というメッセージが発せられ、その直後に電源がオフになります。

※USBメモリへの書き込みを確実にを行うために、製品の電源がオフになるまでの5秒間はUSBメモリを製品から取り外さないで下さい。

ZOLL AED 3® 本体からUSBメモリへデータファイル転送

ZOLL AED 3 除細動器からデータファイルを転送するには、次の手順に従ってください。

1. 5秒間以上電源ボタンを押し続け、AED管理モードに切り替えます。

2. メインディスプレイ画面の「基本設定」アイコンを押します。



基本設定
アイコン

3. USBメモリをAEDの背面にあるUSBコネクタに挿入します。

4. ディスプレイ画面下部のステータスバーに、USBアイコンが表示されます。



USBアイコン

5. 「ファイルのエクスポート」アイコンを押して、次のいずれかのオプションを選択します。


- ・蘇生アーカイブ(すべて)
2つの蘇生データファイルまで含んでいます。
- ・蘇生アーカイブ(新規)
最新の蘇生データファイルを含んでいます。



ファイルの
エクスポート
アイコン

6. 「保存(USB)」を押します。
ZOLL AED 3 でデータの転送が終了すると、「データファイル転送完了」というメッセージが表示されます。

データファイルのCodeReviewへの転送手順

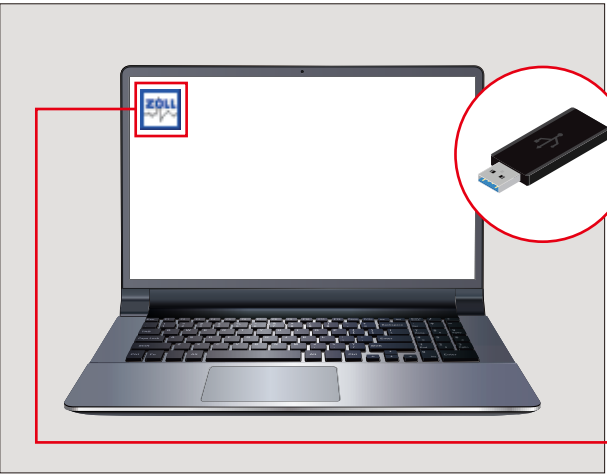


データ転送済みのUSBをPCへ差し込んでください。

データ転送済みUSBをPCへ差す

インストールしたCodeReviewのアイコンをクリックし、CodeReviewを開いてください。


CodeReviewのアイコンをクリック

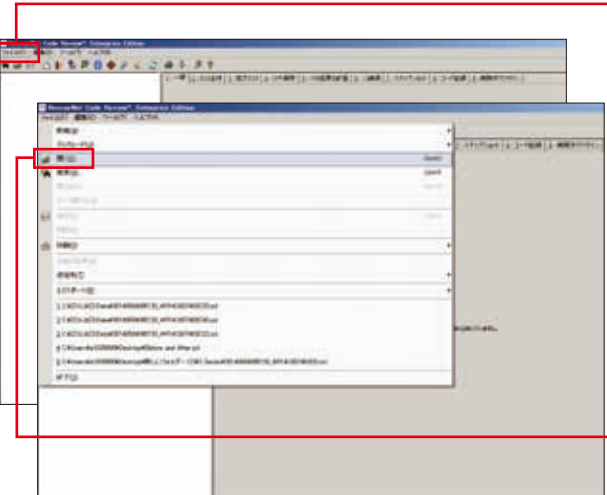

CodeReviewを開いた後、次の手順でデータを開いてください。

「ファイル」をクリック

「開く」をクリック

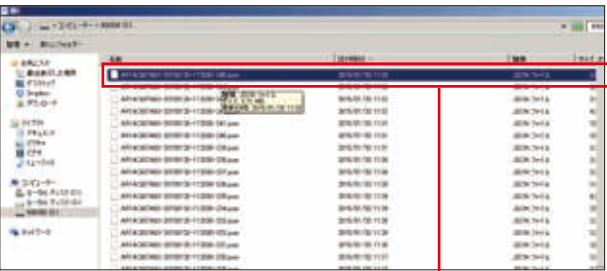

データファイルが保存されているドライブ等を選択し、クリックして開いてください。

ドライブ等を選択し、クリック

MEMO

Blank lined area for notes.