



災害時の対応のお願い

安全を確保したあとに、ご対応をお願いします。

着用型自動除細動器ライフベストを着用中に大災害により停電した場合、バッテリーの充電を継続できるように対処が必要です。

電力会社に連絡

電源が必要な医療機器があることを知らせてください。

停電が24時間以上続くおそれがある場合はバッテリー充電が可能な場所を探してください。

地域の医療機関に連絡

医療機関が手助けできるか否かを確認してください。

バックアップ電源の確保

使用できるバックアップ電源（発電機、車載電源など）を探してください。充電器をバックアップ電源に接続して、予備バッテリーの充電を続けます。バッテリーは毎日交換してください。

上記の助けが得られず24時間以上電源がもたないことが想定される場合
至急サポートセンターまでご連絡ください。



旭化成ゾールメディカル

サポートセンター (24時間対応) 0800-919-3267

電源が復旧したら通常どおり充電器を接続します。

そのままバッテリーの充電を続け、毎日交換します。

旭化成ゾールメディカル株式会社

〒105-0003 東京都港区西新橋2-1-1 興和西新橋ビル

サポートセンター(24時間対応) 0800-919-3267

URL: www.ak-zoll.com